## hago Orthopädiebedarf



Das Clutch-Lock

Aus- und Einbau von oben durch den Schaft.

Kosmetik oder Schaft werden nicht beschädigt.

Aufnahme und Druckmechanik können leicht und schnell ausund eingebaut werden.

Bajonettverschluss-Schrauben werden der Einbauhöhe angepasst.

Aluscheibe wird mit dem Schaft vergossen.

Linksgewinde verhindert Lösen der Druckmechanik.

Justierbarer Bajonettverschluss verbindet Lock mit Prothese.



Beim Aufbau moderner Prothesen mit Haftschaft finden Lock-Systeme zunehmend Verbreitung. Leider war es bisher nicht möglich, das System aus- und einzubauen, ohne den Schaft oder die Kosmetik zu zerstören, da alle bekannten Systeme an der Unterseite des Schafts angebracht oder fest mit dem Schaft vergossen werden müssen.

## \_ock

Das hago<sup>Lock</sup> löst dieses Problem. Das System läßt sich von oben durch den Schaft ausund einbauen.

Ermöglicht wird dies durch den Bajonettverschluss, mit dem die Aufnahme mit der Eingussscheibe verbunden wird. Mit dem Spezialmontageschlüssel kann die Aufnahme spielend leicht fixiert oder entfernt werden.

Das Linksgewinde, mit dem die Druckmechanik in die Aufnahme geschraubt ist, verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Rasterstifts.

Für extreme Aufbaulinien ist das hago<sup>Lock</sup> auch mit einer Minieingussscheibe erhältlich.

Das hago<sup>Lock</sup> ist bis zu 125 kg Körpergewicht getestet, natürlich CE-gekennzeichnet und zum Patent angemeldet.



Spezialmontageschlüssel 3 HL 12

## hago Bergstraße 28 89518 Heidenheim

Telefon 07321 / 480 956 Telefax 07321 / 480 957 Info@hago-world.de www.hago-world.de